

RESALIVA odběrová souprava


Návod k použití



Před samotným odběrem **30 min.** **nejezte, nepijte, nekuřte, nevyplachujte si ústa.**




Umyjte nebo dezinfikujte si ruce.

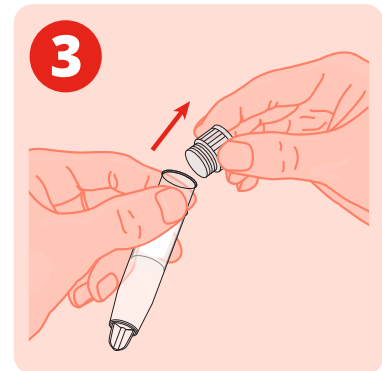

Opatrně otevřete zkumavku s tyčinkou na sliny.



Tyčinku vložte do úst.

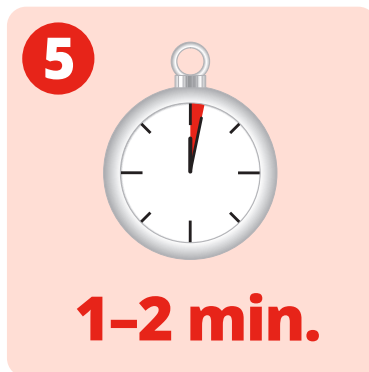

1-2 min.

Tyčinku nechte v ústech **1-2 min.** bez žvýkání.




Tyčinku ústy vložte do zkumavky.



Zkumavku pořádně zavřete.



Na zkumavku nalepte přiložený čárový kód, tak aby byl pouze na dolní části odběrové zkumavky.

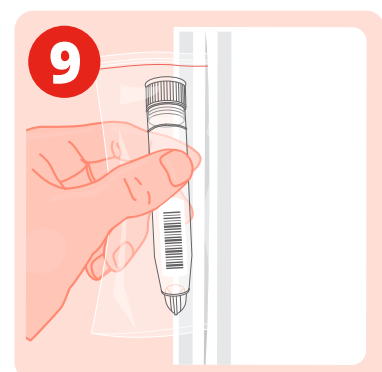

Zkumavku vložte v igelitovém sáčku do obálky a odešlete do laboratoře.

Katalogové číslo GS-316 Odběrová zkumavka na sliny | orders@genespector.com